

# NATURA PATCH<sup>®</sup>



Thérapie Naturelle :  
Patch pour les douleurs musculaires

Terapia Natural :  
Parche para el dolor muscular

Natürliche therapie :  
Pflaster gegen Muskelschmerzen

Natural Therapy :  
Patch for muscle pains

НАТУРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ :  
ПАТЧ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ

réf : 0101

[www.natura4ever.com](http://www.natura4ever.com)

**x5**

11 x 15,5 cm



EC REP



LOT



CN : 157869.3

## PRESENTATION DES PATCHS



Les Patchs NATURA-PATCH sont des patchs anti-douleurs musculaires. Ils agissent aussi bien sur des douleurs chroniques, qu'occasionnelles.

Ils peuvent également être utilisés en cas d'entorses, contusions, torticolis, ou même pour réduire des hématomes.

Ils agissent efficacement sur les douleurs suite aux fractures osseuses (même anciennes) mais également sur les douleurs consécutives à la pose de prothèses (hanches, genoux, par exemple).

- Produit Naturel à effet rapide
- Simple d'utilisation
- Adhère parfaitement à la peau
- Résiste à l'eau (même sous la douche)
- Peut-être coupé lorsqu'il s'agit de petites articulations (doigts des mains et des pieds)
- S'adapte à toutes les parties du corps grâce à sa souplesse et laisse une parfaite mobilité des articulations (genoux, coudes...)
- Couvre parfaitement de grandes zones, telles que les lombaires, les dorsales, les épaules, grâce à ses dimensions

avantageuses

- Dimensions du patch : 11 x 15.5cm
- Conditionnement : pochette de 5 patchs et pochette de 1 patch
- Norme CE
- Autorisation de santé N°5922-PS (Produits sanitaires Classe I)
- S54-1 - Soulage les douleurs musculaires (entorses, torticolis, courbatures, contusions, coups, hématomes, mal au dos)
- CN 157869.3\*

## UNE GARANTIE DE QUALITE

Nos patchs sont fabriqués dans un laboratoire pharmaceutique, partenaire de Natura4Ever, qui respecte toutes les normes internationales de la profession. Ils font l'objet de contrôles à tous les stades de la production. A leur arrivée sur le territoire européen, ils font l'objet d'un contrôle sanitaire rigoureux. Le respect des procédures de réception, de stockage, de suivi des numéros de lots est assuré par une pharmacienne, responsable de la qualité de nos produits.

## DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES PATCHS NATURA PATCH®



### Natura Patch

Quand le patch remplace les aiguilles  
d'acupuncture

On considère en Asie que les méridiens d'énergie représentent la voie par laquelle circule l'énergie vitale. Ces méridiens forment un réseau reliant les différents éléments internes et externes du corps et régularisent le fonctionnement de l'organisme tout entier.

Quand tout fonctionne normalement l'énergie, le sang, les liquides physiologiques circulent de manière régulière et fluide dans ce réseau afin de nourrir les tissus qu'ils traversent.

Depuis très longtemps, l'acupuncture a démontré l'interaction entre les méridiens et les organes qui leur sont associés, à savoir que certains troubles organiques peuvent être identifiés par une perturbation du courant énergétique sur le méridien correspondant ou inversement que les perturbations au niveau du méridien peuvent influencer négativement l'organe correspondant.

C'est sur ces bases que sont conçus les patchs proposés par Natura4Ever. Composés de multiples couches d'extrait concentré d'origine naturelle, ils visent à éliminer la «perturbation énergétique» du méridien et ainsi à «réactiver un processus naturel d'évacuation de la douleur».

Les patchs sont utilisés depuis des milliers d'années en Asie, tant par les médecins (pour traiter les douleurs musculaires, articulaires ou tendineuses) que les pratiquants d'arts martiaux pour les traumatismes, les fractures, les hématomes, les déchirements musculaires...

## QUELQUES CONSEILS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS

- Appliquer les patchs sur une peau propre et sèche.
- Retirer délicatement le film protecteur et appliquer le patch sur la zone douloureuse.
- Appliquer maximum 2 patchs par jour. Le patch peut être découpé en fonction de la taille de la zone à traiter, dans le cas de douleurs très ciblées (petites articulations des doigts et des pieds).
- Renouveler l'application toutes les 24 heures autant de fois que nécessaire.
- Patch Natura Patch peut être appliqué sur toutes les parties du corps, (sauf sur une plaie, une peau irritée, les muqueuses). Dans le cas de zones pileuses, il est recommandé de raser avant application pour une meilleure adhérence.
- Il résiste à l'eau et à la transpiration.
- Il peut être appliqué à n'importe quel moment de la journée.

## CONTRE-INDICATIONS

- Application externe uniquement.
- Ne jamais appliquer sur une plaie ouverte, sur une peau irritée ou sur les muqueuses.
- Tenir éloigné de toute source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas appliquer à des enfants de moins de 7 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes.
- Pour prévenir toute réaction allergique, il est conseillé de procéder à un test préalable avec quelques cm<sup>2</sup> d'échantillon.
- Lors de l'application du patch, l'impression de fraîcheur ou de chaleur est normale et souhaitable. Toutefois, il peut arriver que cette impression se transforme en sensation inconfortable, il convient alors de retirer le patch immédiatement.

